



Herzlich willkommen!

DAS EVERSENSE XL CGM SYSTEM

Für ein sicheres Gefühl –
das einzigartige Langzeit-CGM System

FÜR EIN SICHERES GEFÜHL - DAS EINZIGARTIGE LANGZEIT-CGM SYSTEM

- **Unter der Haut eingesetzter Sensor mit einer Laufzeit von bis zu 6 Monaten**
Kein wöchentlicher Sensorwechsel nötig
- **Kontinuierliche Glukosewerte in der Smartphone-App immer im Blick**
Kein zusätzliches Empfangsgerät erforderlich
- **Vibrationsalarme direkt am Körper mit dem Smart Transmitter**
Auch wenn das Smartphone nicht in der Nähe ist



HERZLICH WILLKOMMEN! JETZT SIND SIE BALD EIN EVERSENSE-TRÄGER!

In Kürze erhalten Sie mit Eversense XL das erste Langzeit-CGM System mit einer Laufzeit von bis zu 6 Monaten. Wir freuen uns mit Ihnen!

Was sind die nächsten Schritte zu Ihrem Eversense XL CGM System?

1. Bitte vereinbaren Sie einen Termin in Ihrem Eversense CGM-Zentrum
Bitte teilen Sie den vereinbarten Termin auch unserem Eversense Team im Service Versorgungsmanagement unter der folgenden Telefonnummer mit: **0800 50 88888**
2. Bitte bringen Sie Ihre Eversense Begrüßungsmappe zu allen Terminen mit, sodass wir gemeinsam mit Ihnen alle Unterlagen durchgehen können. Hier erhalten Sie auch eine Einweisung in alle Funktionen Ihres neuen Eversense XL CGM Systems.

Laden Sie vorab die Eversense App herunter und führen Sie die Registrierung durch. Die Anleitung finden Sie auf den folgenden Seiten.

Was benötigen Sie zum Start mit dem Eversense XL CGM System?


- Ihr Smartphone und eine WLAN-Internetverbindung. Hier finden Sie eine Liste aller kompatiblen Smartphones:
www.eversense.de/smartphones
- Das Set mit Ihrem Eversense XL CGM System senden wir rechtzeitig zu Ihrem vereinbarten Termin an Ihr Eversense CGM-Zentrum. Es liegt dann für Sie zum Einsetzen des Sensors bereit.

SCHRITT 1: HERUNTERLADEN UND INSTALLIEREN DER APP

1. Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone den Apple® App StoreSM bzw. Google PlayTM, suchen Sie nach „Eversense“ und laden Sie die kostenlose Eversense App herunter.



iOS

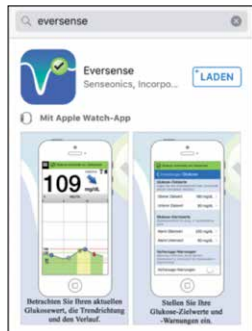

Android



2. Installieren Sie die App. Folgen Sie hierfür den Installationsanweisungen. Danach befindet sich Ihre Eversense App im Hauptmenü Ihres Smartphones.



SCHRITT 2: EINRICHTEN DER APP – BENUTZERKONTO ERSTELLEN UND REGISTRIERUNG

1. Beginnen Sie mit der Registrierung. Öffnen Sie hierfür die App auf Ihrem Smartphone.
2. Lesen Sie sich die **ENDBENUTZER-LIZENZVEREINBARUNG** durch und tippen Sie auf **Annehmen**.



3. Erstellen Sie ein Benutzerkonto:


Nachdem Sie der Vereinbarung zugestimmt haben, werden Sie aufgefordert, sich mit Ihrer eigenen E-Mail-Adresse und einem selbst gewählten Kennwort zu registrieren. Tippen Sie auf **Konto erstellen**.



Tipps zur Wahl des Kennworts:

Wählen Sie mind. 6 Zeichen, einen Groß- und einen Kleinbuchstaben, ein Sonderzeichen sowie eine Zahl. Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen, können Sie es über die App zurücksetzen. Wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse vergessen, wenden Sie sich an das Eversense Team im Accu-Chek[®] Kunden Service Center.

Geben Sie Ihre Benutzerkontoinformationen ein und tippen Sie dann auf **Registrieren**.

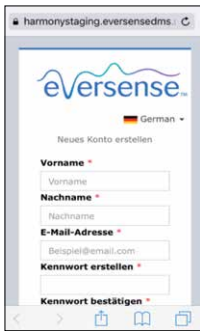


Nach einer kurzen Zeit wird Ihnen eine Registrierungs-mail zugesendet. Bitte überprüfen Sie an dieser Stelle auch Ihren Spam-Ordner, falls Sie keine E-Mail erhalten sollten.

Für einen Abschluss der erfolgreichen Registrierung öffnen Sie diese E-Mail und klicken Sie auf den Link.

Tippen Sie anschließend auf **Fertig**, um zur Eversense Anmeldung zurückzukehren.

Wenn Sie sich angemeldet haben wird der Begrüßungsbildschirm angezeigt.

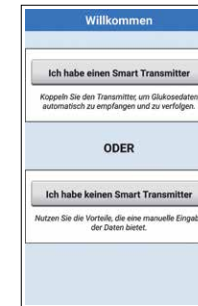

Damit ist die Registrierung abgeschlossen. Alle weiteren Informationen sowie den Smart Transmitter erhalten Sie bei Ihrem Einweisungstermin.

Folgende weitere Sprachen können Sie unter anderem einstellen:



4. Melden Sie sich jetzt an:



Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein und tippen Sie auf **Anmelden**, um Ihre Eversense App zu starten.

Hinweis:

Das Eversense XL CGM System verfügt über eine voreingestellte Auto-synchronisation, die Ihre Glukosemessungen automatisch alle zwei Stunden mit Ihrem Eversense DMS-Konto synchronisiert. Diese Funktion kann durch die Navigation auf **MEINE DATEN FREIGEBEN** und dann **SYNC** in der Eversense App manuell ausgeschaltet werden. Weitere Fragen werden im Rahmen Ihres Termins im Eversense CGM-Zentrum beantwortet.

SIE WOLLEN MEHR ERFAHREN?

Unser Eversense Team im Accu-Chek® Kunden Service Center ist für Sie da!
Kostenfreie Telefonnummer 0800 7244119 (Mo–Fr, 08:00–18:00 Uhr).
Oder besuchen Sie uns unter: www.eversense.de

Eversense ist eine Kooperation von Roche Diabetes Care mit Senseonics.

Alle erwähnten Markennamen sind gesetzlich geschützt. Eversense, Eversense XL, Eversense Continuous Glucose Monitoring, Eversense CGM, Eversense Sensor, Eversense Smart Transmitter, Eversense App und Eversense Now App sind Marken von Senseonics, Incorporated. Apple, App Store, iPhone und Apple Watch sind eingetragene Marken von Apple Inc. Android und Google Play sind eingetragene Marken von Google LLC. ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE, ACCU-CHEK GUIDE, ACCU-CHEK COMBO, ACCU-CHEK INSIGHT und mySugr sind Marken von Roche.

© 2019 Roche Diabetes Care Deutschland. Alle Rechte vorbehalten.

Hergestellt von: Senseonics, Incorporated

Vertrieb durch: Roche Diabetes Care Deutschland GmbH

www.accu-check.de

Roche Diabetes Care Deutschland GmbH

Sandhofer Straße 116

68305 Mannheim

